



AeroChamber  
*Plus* Flow-Vu

# LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA TÉCNICA INHALATORIA



FABRICADA  
EN CANADÁ

¡NUEVO!



# PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ABBOTT



## BUDESONIDA 200 mcg

INDICADO PARA:

Tratamiento del asma bronquial crónica en aquellos pacientes en que la terapia convencional no resulta efectiva.\*



## SALBUTAMOL 100 mcg

INDICADO PARA:

Prevención y tratamiento del broncoespasmo en pacientes con obstrucción reversible de la vía aérea.\*



## SALMETEROL/FLUTICASONA 25/125 mcg SALMETEROL/FLUTICASONA 25/250 mcg

INDICADO PARA:

Tratamiento de mantención de pacientes con asma, en donde el empleo de una combinación (broncodilatador y corticoide inhalado) es apropiado.

Tratamiento de mantención de la EPOC, incluyendo bronquitis crónica y enfisema.\*

# AeroChamber Plus Flow-Vu

Cámara de Retención con Válvula Antiestática

## USE LA AEROCÁMARA SELECCIONADA CON SU INHALADOR DE DOSIS MEDIDA



**MÁSCARA  
PEQUEÑA**  
0 a 18 meses



**MÁSCARA  
MEDIANA**  
1-5 años



**MÁSCARA  
PEQUEÑA**  
Adultos



**MÁSCARA  
GRANDE**  
Adultos



**BOQUILLA ORAL**



Material dirigido a profesional de la salud para sus pacientes con prescripción de producto Abbott, con fines informativos y de apoyo en diagnóstico y tratamiento de sus pacientes.  
Abbott, Av. Carrascal 5670, Quinta Normal, Santiago - Chile.  
CHL2339020 (v1.2)



**Abbott**

## INHALADOR DE DOSIS MEDIDA CON AEROCÁMARA<sup>1</sup>



1. Ensamblar las piezas de la cámara.



2. Colocarse de pie o incorporado para permitir la máxima expansión torácica.



3. Quitar tapa del inhalador y agitar.



4. Acoplarlo en el orificio adecuado de la cámara, en posición vertical (en forma de "L").



5. Hacer una espiración completa.



6. Colocar los labios en la cámara alrededor de la pieza bucal, efectuar una pulsación e inspirar lenta y profundamente, durante 3-4 segundos tras pulsar el inhalador. (En paciente anciano o con flujo inspiratorio bajo se puede hacer en varias inhalaciones, 4-5 dentro y fuera de la cámara).



7. Retirar la cámara de la boca.



8. Mantener la respiración durante 8-10 segundos o lo máximo posible.



9. Si se precisan nuevas dosis de este u otro inhalador, esperar un mínimo de 30 segundos antes de hacer las siguientes inhalaciones.



10. Al finalizar las inhalaciones enjuagarse la boca con agua.



11. Las cámaras deben limpiarse periódicamente con agua y jabón neutro y secar sin frotar.



12. Las cámaras con mascarilla incorporada están indicadas especialmente en Pediatría.

1.- <https://www.gemasma.com/pacientes> Pág. 34

Material dirigido a profesional de la salud para sus pacientes con prescripción de producto Abbott, con fines informativos y de apoyo en diagnóstico y tratamiento de sus pacientes.

Abbott, Av. Carrascal 5670, Quinta Normal. Santiago - Chile.

CHL2339020 (v.1.2)